

Diagnostikcentrum

Märkning av rör i ROS

Viktigt att

- etiketten sätts över rörets etikett och placeras rättvänd
- org-enhetsnumret syns så lab kan spåra beställare vid datastopp
- Glöm inte **skicka beställning med F10**



Särskild instruktion för SR-rör

- Rätt etikett från rätt remiss
- Etiketten placeras direkt under korken
- Etiketten ska sitta slätt på röret

Använd denna etikett

19 591223-2849 Nilsson, Malin	Planerad provtagningsid 2011-03-07 Verklig provtagningsid
76011154  Provtagare 76011154
0276011154 OBS! Använd etiketten ovan. Fäst etiketten nära korken. Röret fylls till mellan märkningarna på röret och vänds omedelbart 10 ggr.	Klinisk kemi  19 591223-2849 Nilsson, Malin B-SR
0276011154 20920031	0276011154 Svart SR

Maria Kuusinen, laboratorieinstruktör
Klinisk kemi
Diagnostikcentrum
010-103 3043
Maria.Kuusinen@regionostergotland.se