


## Märkning av rör i ROS

<p style="text-align: center;"><b>Viktigt att</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• etiketten sätts över rörets etikett och placeras rättvänd</li><li>• org-enhetsnumret syns så lab kan spåra beställare vid datastopp</li><li>• Glöm inte <b>skicka beställning med F10</b></li></ul>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

## Särskild instruktion för SR-rör

- Etiketten placeras direkt under korken
- Etiketten ska sitta slätt på röret
- Blod fylls upp till mellan de två markeringarna på SR-röret

